

Boston® Cleaner ADVANCE FORMULA & Boston® Conditioner ADVANCE COMFORT FORMULA

Pflege für formstabile, sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen

Handhabung & Hinweise für den Gebrauch:

ANWENDUNG: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, besonders die Warnhinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Heben Sie sie für zukünftiges Nachlesen auf.

Das Boston® Pflegesystem enthält:

Boston® Cleaner für die tägliche Reinigung Ihrer Kontaktlinsen und Boston® Conditioner zur Pflege (Benetzen, Aufbewahren, Desinfizieren) Ihrer Linsen über Nacht und zum Benetzen Ihrer Kontaktlinsen vor und während des Kontaktlinsentragens. Für die richtige Pflege Ihrer Kontaktlinsen ist es wichtig, beide Lösungen zu verwenden.

Boston® Cleaner

Boston® Cleaner ist zur Reinigung von Kontaktlinsen aus Fluorsiliconacrylat und Silikonacrylat vor der Pflege (Benetzen, Aufbewahren, Desinfektion) gedacht. Boston® Cleaner entfernt angesammelte Beläge, hartnäckige Ablagerungen (einschließlich Proteinen und Fetten) und Fremdkörper von diesen Linsen.

INHALTSSTOFFE: Aktive Komponente: Alkylsulfatbasiertes Tensid (8,0%); Sonstige Inhaltsstoffe: Natriumchlorid, Natriumphosphat, alkoholbasierte nichtionische Tenside, Silicagel-Suspension, Titandioxid. Lösung nicht verwenden, wenn Sie gegen einen Bestandteil dieses Produkts allergisch sind.

1. Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie die Kontaktlinsen anfassen.
2. Reiben Sie in Ihrem Handteller jede Kontaktlinse sanft beidseitig mit einigen Tropfen Boston® Cleaner zwanzig (20) Sekunden lang ab.
3. ENTFERNEN SIE ANSCHLEND ALLE RESTE DES CLEANERS DURCH GRÜNDLICHES ABSPÜLEN DER LINSE, WIE ES IHNEN IHR KONTAKTLINSENESPEZIALIST ERKLÄRT HAT.
4. Kontaktlinsen in den Behälter zur Aufbewahrung legen und jede Linse mit frischem Boston® Conditioner bedecken. Zur Verwendung Ihrer Conditioner-Lösung folgen Sie bitte den Anweisungen auf der anderen Seite dieser Anleitung.
5. Flasche nach Verwendung wieder fest verschließen.

VORSICHTSMAßNAHMEN: Um ordnungsgemäße Hygiene und Handhabung Ihrer Kontaktlinsen und Pflegelösung sicherzustellen, halten Sie sich bitte genau an die Anweisungen.

- Waschen Sie sich stets die Hände bevor Sie die Kontaktlinsen anfassen.
- **Kontaktlinsen niemals in Boston® Cleaner eintauchen und auch nicht darin aufbewahren.**
- Die Kontaktlinsen nach der Reinigung mit Boston® Cleaner stets gründlich abspülen, wie es Ihnen Ihr Kontaktlinsenspezialist erklärt hat.
- Gebrauchte Lösungen niemals wiederverwenden.
- Um eine Verunreinigung der Lösung zu vermeiden, Tropfspitze der Flasche weder mit Gegenständen in Kontakt bringen noch mit den Händen berühren.
- Den Aufbewahrungsbehälter stets gründlich mit abgekochtem, heißem Wasser reinigen und täglich offen trocknen lassen. **Die Aufbewahrungslösung vor der Aufbewahrung der Kontaktlinsen komplett erneuern.**
- Lösungen bei Raumtemperatur (15-30°C) lagern. Vor Gefrieren schützen.
- Lösung nach dem auf der Flasche angegebenen Mindestverwendbarkeitsdatum nicht mehr verwenden. Letzteres gilt auch für noch ungeöffnete Flaschen.
- Angebrochene Flasche nicht länger als neunzig (90) Tage verwenden. Stets sorgsam auf Hygiene und korrekte Handhabung achten. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verunreinigung der Kontaktlinsen und der Pflegelösung mit Bakterien.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets fest verschlossen halten.
- Nicht verwenden, wenn das Siegelband an der Flasche beschädigt ist oder fehlt.

Warnhinweise:

- **LÖSUNG IST NICHT ZUR DIREKTEN ANWENDUNG AM AUGE GEEIGNET.** Wenn der Cleaner versehentlich ins Auge gebracht wird, wird er Reizungen verursachen. **KONTAKTLINSEN ABSETZEN** und die Augen sofort mit Leitungswasser spülen, bis die Reizung nachlässt. Wenn Sie die Reizung nicht stoppen können, kontaktieren Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten.
- Diese Lösung ist nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.

- VON KINDERN FERNHALTEN.

WENN SIE EINE REIZUNG ODER SCHMERZEN IM AUGE VERSPÜREN, ÜBERMASSIGEN TRÄNENFLUSS, SEHBEEINTRÄCHTIGUNGEN ODER EINE RÖTUNG DES AUGES FESTSTELLEN, KONTAKTLINSEN SOFORT ABSETZEN UND UNVERZÜGLICH KONTAKT MIT IHREM AUGENARZT ODER KONTAKTLINSENESPEZIALISTEN AUFNEHMEN.

Lieferform:

Boston® Cleaner wird in sterilen Flaschen zu 30 ml angeboten. Die Flaschen tragen eine Chargennummer und ein Verwendbarkeitsdatum.

Boston® Conditioner: Boston® Conditioner ist eine speziell formulierte Lösung zur Pflege formstabiler, gasdurchlässiger Kontaktlinsen. Sie enthält ein patentiertes Multi-Polymer-Komfortsystem, das die Linsenoberfläche umhüllt und einen schützenden Film bildet. Es umhüllt die Kontaktlinse beim Einsetzen und sorgt für eine gleichbleibend hohe Benetzung über den ganzen Tag. Das patentierte Multi-Polymer-System des Boston® Conditioners vermindert Reizungen sowohl auf dem Auge als auch am Augenlid und löst Ablagerungen, die Trageprobleme verursachen könnten.

Die Pflegelösung wurde hinsichtlich der Bioverträglichkeit mit Ihren Augen entwickelt. Sie enthält ein optimiertes Konservierungssystem, das Krankheitserreger auf der Oberfläche formstabiler, gasdurchlässiger Kontaktlinsen unschädlich macht.

Boston® Conditioner ist speziell für den Gebrauch mit Kontaktlinsen aus Fluorsiliconacrylat und Siliconacrylat sowie oberflächenbehandelten formstabilen, gasdurchlässigen Kontaktlinsen entwickelt, nachdem diese gereinigt worden sind. Die Lösung eignet sich auch zur Pflege von PMMA Kontaktlinsen.

INHALTSSTOFFE: Boston® Conditioner ist eine sterile Lösung. Sie enthält:

Aktive Komponenten: Polyaminopropylbiguanid (0,0005 %), Chlorhexidingluconat (0,003 %), EDTA Dinatriumsalz (0,05 %). Sonstige: Salze und Pufferverbindungen, Polyquaternium 10, Verdickungsmittel auf Cellulosebasis, Polyvinylalkohol, derivatisiertes Polyethylenglycol. Lösung nicht verwenden, wenn Sie gegen einen Bestandteil dieses Produkts allergisch sind.

1. Waschen Sie sich stets die Hände, bevor Sie die Kontaktlinsen anfassen.
2. Folgen Sie beim Reinigen der Kontaktlinsen der Anleitung auf Ihrem Kontaktlinsenreiniger.
3. Legen Sie die Kontaktlinsen in den Behälter zur Aufbewahrung und bedecken Sie beide Kontaktlinsen mit **frischem** Boston® Conditioner.
4. Lassen Sie die Lösung für eine wirksame Reinigung mindestens vier (4) Stunden lang einwirken, ehe Sie die Kontaktlinsen auf Ihre Augen setzen.
5. Nachdem Sie die Kontaktlinsen dem Behälter entnommen haben, geben Sie vor dem Aufsetzen noch einmal frische Lösung auf die Kontaktlinsen.
6. Den Aufbewahrungsbehälter stets gründlich mit abgekochtem, heißen Wasser reinigen und täglich offen trocken lassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie alle Produkthinweise und Anleitungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten zur Pflege Ihrer Augen, zum korrekten Gebrauch Ihrer Kontaktlinsen, wie auch zum Gebrauch der diesbezüglichen Pflegeprodukte sorgsam befolgen.

- **Gebrauchte Lösung niemals wiederverwenden.** Für eine wirksame Reinigung die Lösung im Aufbewahrungsbehälter täglich vor der Aufbewahrung Ihrer Linsen vollständig erneuern.
- **Kontaktlinsen niemals in Reinigern aufbewahren.**
- Bei Raumtemperatur (15–30°C) aufbewahren. Lösungen dürfen nicht extrem kalten oder heißen Temperaturen ausgesetzt werden. Vor Gefrieren schützen.
- Lösung nach dem auf der Flasche angegebenen Verwendbarkeitsdatum nicht mehr verwenden. Letzteres gilt auch für noch ungeöffnete Flaschen.
- Angebrochene Flasche nicht länger als neunzig (90) Tage verwenden.
- Stets sorgsam auf Hygiene und korrekte Handhabung achten. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verunreinigung der Kontaktlinsen und der Pflegelösung mit Bakterien.
- Vermeiden Sie es, diese Lösung in Kontakt mit Kleidung oder Handtüchern zu bringen, da sie auf verschiedenen Stoffen Flecken verursachen kann.

WARNHINWEISE:

- Diese Lösung ist nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.

VON KINDERN FEINHALTEN

WENN SIE EINE REIZUNG ODER SCHMERZEN IM AUGE VERSPÜREN, ÜBERMASSIGEN TRÄNENFLUSS, SEHBEEINTRÄCHTIGUNGEN ODER EINE RÖTUNG DES AUGES FESTSTELLEN, KONTAKTLINSEN SOFORT ABSETZEN UND UNVERZÜGLICH KONTAKT MIT IHREM AUGENARZT ODER KONTAKTLINSENSPEZIALISTEN AUFNEHMEN.

Lieferform:

Boston® Conditioner wird in sterilen Flaschen zu 120 ml angeboten. Die Flaschen tragen eine Chargennummer und ein Verwendbarkeitsdatum.

AUSGABEDATUM: 2018-11

Die folgenden Hinweise gelten für beide Produkte:



Bausch & Lomb Incorporated
1400 N. Goodman St.
Rochester, NY 14609, USA

CE 0050



Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate, Waterford, X91 V383, Ireland

Hergestellt in Italien

Boston Advance Formula ist ein Warenzeichen von Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated

I31081293W

P1DE03