

SOFLENS® DAILY DISPOSABLE GEBRAUCHSANWEISUNG

Dieses Merkblatt soll Anwender von hydrophilen, weichen SofLens® Daily Disposable-Kontaktlinsen darüber informieren, was beim Tragen und der Pflege der Linsen zu beachten ist. Es gilt für:

PRODUKTNAME	MATERIAL	WASSERGEHALT	VERPACKUNGSÖSUNG
SofLens® Daily Disposable (Hilafilcon B) leicht getönte Kontaktlinsen	Hilafilcon B	59% Gewichtsprozent	Boratgepufferte Kochsalzlösung
SofLens® Daily Disposable Toric (Hilafilcon B) leicht getönte Kontaktlinsen	Hilafilcon B	59% Gewichtsprozent	Boratgepufferte Kochsalzlösung

Beschreibung und Tragemodus

Diese Linsen sind für den Daily Disposable-Tragemodus gedacht und sollten nach jedem Tragen entsorgt werden. Eine Wiederverwendung ohne Reinigung und Desinfektion der Linsen könnte zu einer Infektion und/oder ernsthaften Verletzung der Augen führen. Halten Sie sich immer an die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Tragemodalitäten.

Die Linsen werden in sterilem Zustand ausgeliefert und wurden vom Hersteller für den maximalen Tragezeitraum von einem Tag konzipiert. Sie wurden unter Dampf sterilisiert.

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist.

Anleitung zum Aufsetzen und Absetzen

Bevor Sie die Linsen berühren, waschen und trocknen Sie immer gründlich Ihre Hände, wobei Sie parfümierte Seife oder Seife mit medizinischen Zusätzen vermeiden sollten. Legen Sie die Linse auf Ihre Handfläche. Achten Sie darauf, dass die Linse mit der richtigen Seite nach außen zeigt.



Überprüfen Sie die Linse vor dem Aufsetzen auf mögliche Kratzer oder Beschädigungen. Achten Sie beim Absetzen der Linse darauf, dass Ihre Hände sauber und

trocken sind. Schieben Sie die Linse mit dem Finger nach unten in den weißen Bereich des Auges und setzen Sie sie vom Auge ab. Verwenden Sie Benetzungstropfen, wenn sich die Linse nur schwer absetzen lässt. Entsorgen Sie die Linsen jedes Mal, wenn Sie sie vom Auge abgesetzt haben.

Linsenpflege

- Bevor Sie die Linsen berühren, waschen und spülen Sie Ihre Hände immer gründlich ab
- Achten Sie darauf, dass keine Kosmetika, Lotionen, Seife oder parfümierte Substanzen in Ihr Auge oder auf die Linse geraten
- Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder Fingernägel, um die Linsen aus dem Behälter oder vom Auge zu nehmen
- Entsorgen Sie die Linsen jedes Mal nach dem Absetzen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie sich nicht an die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Tragezeiträume und Reinigungsverfahren halten, kann dies zu einem höheren Risiko für schwerwiegende Augeninfektionen führen. Tragen Sie Daily Disposable-Linsen nicht länger als einen Tag lang oder beim Schlafen.

Tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn Sie unter folgenden Zuständen leiden:

- Allergie, Entzündung, Infektion oder Rötung im oder am Auge
- Trockene Augen (keine ausreichende Tränenflüssigkeit)
- Schlechter Gesundheitszustand, der sich auf die Augen auswirkt, z. B. Erkältung oder Grippe
- Systemische Erkrankung, die sich auf die Augen auswirkt.

Wenden Sie sich in folgenden Situationen vor dem Tragen von Kontaktlinsen an Ihren Kontaktlinsenspezialisten:

- Ausüben von Wassersport
- Aufenthalt in extrem trockenen oder staubigen Umgebungen
- Verwendung von Augenmedikamenten.

Wenn eines der folgenden Probleme bei Ihnen auftritt, nehmen Sie Ihre Linsen **sofort** aus dem Auge:

- Stechen, Brennen, Jucken, Reizung oder sonstige Schmerzen im Auge
- Verringerter Tragekomfort im Vergleich zu früherem Tragen
- Ungewöhnliche Sekretbildung oder übermäßiges Tränen der Augen
- Rötung der Augen
- Extrem oder anhaltend trockene Augen
- Eingeschränkte oder verschwommene Sicht
- Regenbögen oder Lichthöfe um Lichtquellen
- Lichtempfindlichkeit

Hält eines dieser Symptome auch nach dem Absetzen, Reinigen und Wiederaufsetzen der Linse oder dem Aufsetzen einer neuen Linse an, setzen Sie die Linse ab und **wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten**. Diese Symptome können zu schwerwiegenden Erkrankungen führen, wenn sie ignoriert werden.

Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated,
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

® / ™ bezeichnen Warenzeichen von Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated

Artikelnummer: SDDIFUDE